

PAPILDOMOS PROGRAMOS 3DVR INSTALIACIJA

1. Prieš pradėdami 3DVR instaliaciją, įdiekite iCAT Vision programą.
2. Atidarykite kompacto turinį. Dešiniuoju pelės klavišu spragtelkite ant piktogramos ir kontekstiniame meniu pasirinkite **Open**.
3. Nukopijuokite “3DVR.exe” failą į katalogą, kuriame instaliavote iCAT Vision (pagal nutylėjimą “C:\Program Files\ISIP\iCATVision\”).



3DVR.exe

4. Tai atlikę, dukart spragtelkite ant “3DVR.exe” piktogramos, kad ją aktyvuotumėte, palaukite, kol programa pilnai užsikraus, ir ją uždarykite.
5. Papildomos programos 3DVR instaliacija baigta. Norėdami naudotis šia programa, paleiskite iCAT Vision. Pasirinkite paciento nuotrauką ir luktelkite, kol ji bus atidaryta. Pagrindinėje įrankių juostoje pasirinkite **Tools/Start 3DVR**.